

PROJECTPLAN: MAKEN VAN MONDNEUSMASKERS

VOOR DE VERZORGENDE VAN



16 MAART 2020

TECHNISCHE FICHE OPGEMAAKT IN SAMENSpraak MET MARLEEN MAES, PREVENTIEADVISEUR FAMILIEHULP

Waarom? Er zijn onvoldoende mondneusmaskers (MNK) voorradig en er is een dringende nood gezien de Corona pandemie, zowel bij verzorgend personeel (vermijden van onbedoeld serieel besmetten van cliënten) als voor cliënten (preventief maar ook ikv mogelijke quarantainezorg).

Wat? We gaan zelf 5000 mondneusmaskers maken en zo mogelijk een veelvoud hiervan

Wie? Voor het maken van de mondneusmaskers - verzorgende die technisch werkloos zijn - leerkrachten van de opleidingscentra die de lessen verstel geven - vrijwilligers van Femma

Wanneer? Met onmiddellijke ingang

Mondmaskers beschermen zorgprofessionals en bezoekers van cliënten tegen infecties. De correcte benaming voor mondmaskers of mondkapjes is mondneusmaskers MNK. Ze zijn er in verschillende soorten en maten. Voor een optimale bescherming is het van belang dat je goed weet welk mondneusmasker waarvoor geschikt is. Hiervoor zijn Europese richtlijnen, normen en standaarden opgesteld.

TYPE MONDNEUSMASKERS


Het chirurgisch mondneusmasker:


dit is een medisch hulpmiddel en beschermt de patiënt tegen ziekteverwekkers uit de neus of mond van medewerkers. Daarnaast beschermt het de medewerker voor het aanraken met de handen of de handschoenen aan eigen mond of neus.

Het ademhalingsbeschermingsmasker:

dit is een persoonlijk beschermingsmiddel en beschermt de gebruiker tegen ziekteverwekkers die via de lucht verspreid kunnen worden.

1. **Stof moet uit 35 % polyester en 65 % katoen bestaan** dit materiaal kan gewassen worden op 60° C (is thermisch ontsmet) en is zo gebruiksvriendelijk
2. **100% katoen** is ook conform de richtlijnen op voorwaarde dat het dubbel gestikt is
3. **Garen** gebruiken dat tegen **hoge temperaturen bestand** is
4. Mag met **elastiek (36 cm per masker)** of met een **katoenen lint** zijn
5. Wanneer het MNK **gemaakt is moet het gewassen worden op 60°C en gestreken worden op minstens 150°C** voordat het gebruikt mag worden

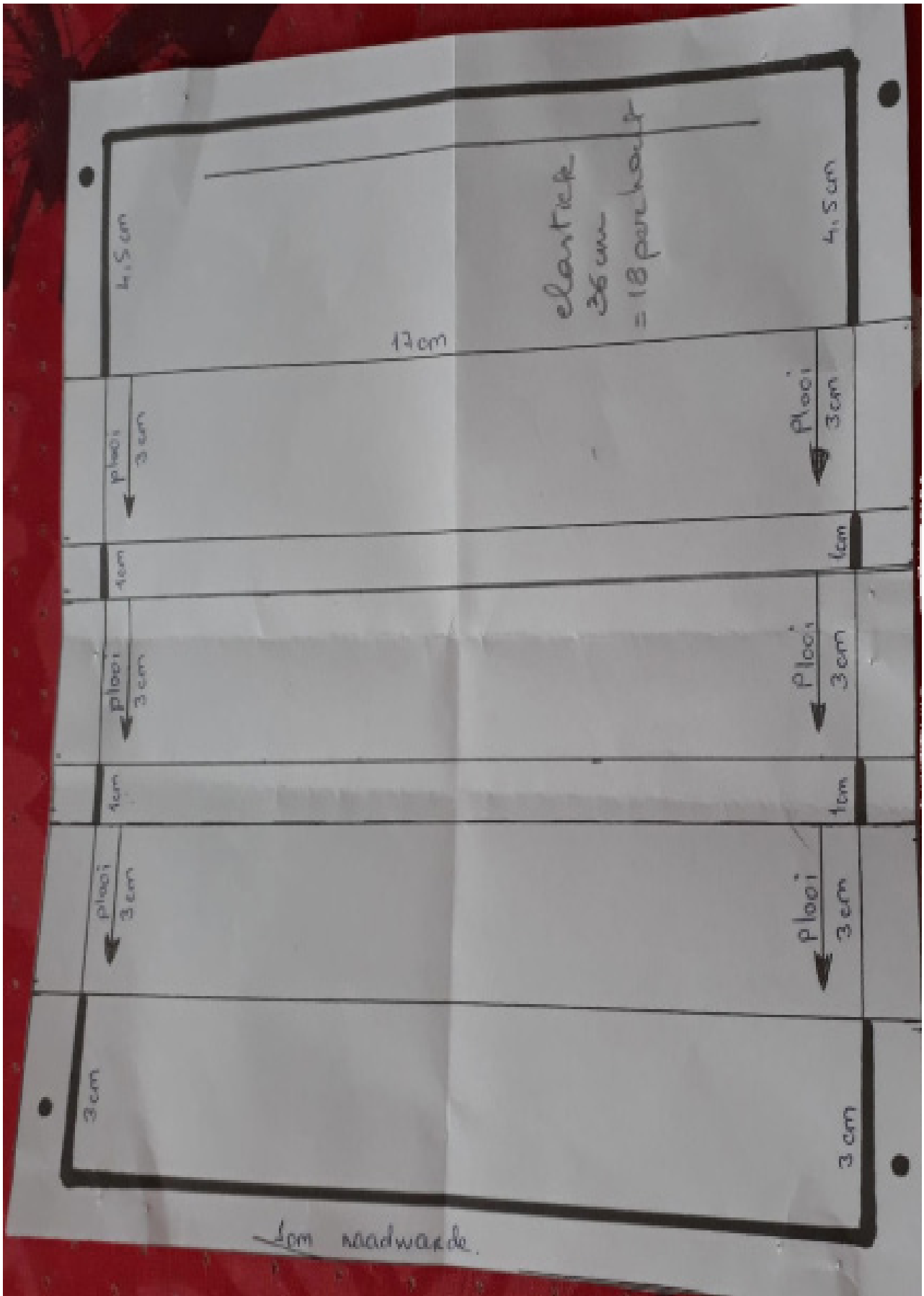

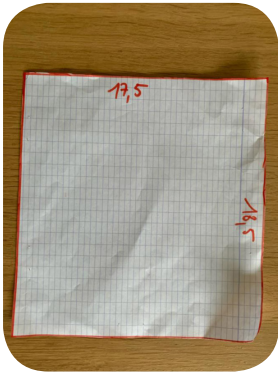

STAP 1


Maak een sjabloon uit papier. Afmeting is 17,5 x 18,5cm

STAP 2

Knip het sjabloon uit.

STAP 3

Gebruik stof: liefst katoen/linnen dat in de kookwas kan

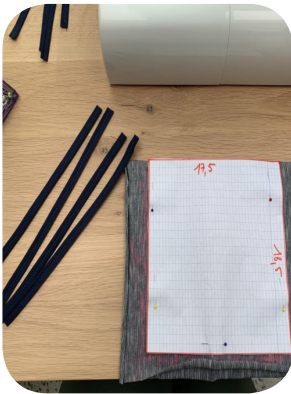


STAP 4

Vouw de stof in 2 (goede kant naar binnen)


STAP 5

Leg het sjabloon op de rand van de vouw. Teken af met krijt.

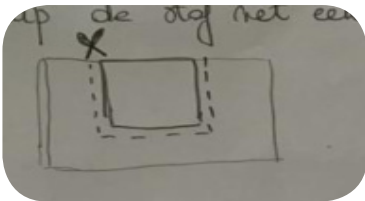

STAP 6


Knip de stof met een rand van 1 cm extra

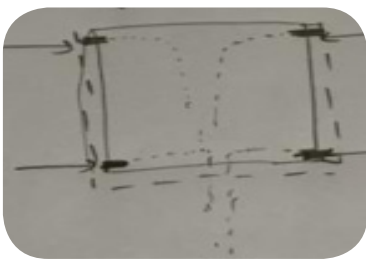

STAP 7

Pak 4 linten van minimum 40cm

Leg deze aan de binnenkant van de stof in de 4 hoeken
(2 boven, 2 onder)

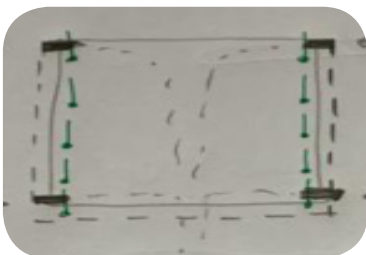

STAP 8

Spelt dit nu mooi af met hun linten op hun plaats aan de bovenzijde

STAP 9

Nu rest er enkel nog het stikken van 3 plooiën in het masker.
Let op voor je naald (de naald kan makkelijk breken bij teveel lagen stof).

de bovenste plooi = 3cm

vervolgens plooi je terug met 1,5cm

dit doe je nog eens met 1,5cm

waarna je 3 plooiën in het midden krijgt



a/ eerst afspelden

b/ daarna strijken, dat de plooiën goed liggen

c/ overstik de randen links en rechts overheen de plooiën



KLAAAR! bedankt voor je hulp!!